



Grupo Farmacéutico
Santo Tomás

Distribuido en México por:

www.gfsantotomas.com

Literatura exclusiva para médicos y personal de laboratorio.
Registro sanitario No.: 0284R99SSA
Aviso SSA: 143300202C5068

Fabricado por:



Diagnóstico es seguridad.

Respuestas confiables, decisiones oportunas.

SURE CHECK® HIV 1/2

SURE CHECK® HIV 1/2 es una prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 y 2 en suero, plasma o sangre total.

SURE CHECK® HIV 1/2 está diseñada para un uso seguro, eficaz y de fácil empleo. No requiere alta capacitación ni aditamentos adicionales.

Presentación:

Caja con 25 pruebas envasadas de manera individual.

Contenido:

- Dispositivo con tira de prueba dentro
- Vial con solución amortiguadora
 - Lanceta estéril de seguridad
 - Banda adhesiva
 - Desecante
 - Instructivo








Al utilizar SURE CHECK® HIV 1/2 obtiene ventajas como:

- 100% de sensibilidad y especificidad avalada por el INDRE
- Facilidad de uso
 - Diseño innovador
 - Totalmente individualizada
 - Almacenamiento a temperatura ambiente (no requiere refrigeración)

Clave de cuadro básico: 080.829.5356

Cómo aplicar la prueba:

- 1 Realice la punción utilizando la lanceta.
- 2 TOQUE la gota de sangre con la punta capilar del dispositivo.
- 3 REMUEVA el vial del buffer de la parte superior del dispositivo.
- 4 INSERTE firmemente la punta capilar del dispositivo dentro del vial.
- 5 LEA los resultados de la prueba después de 15 minutos.

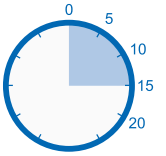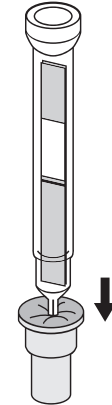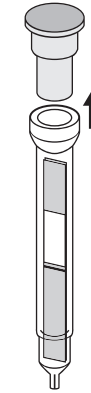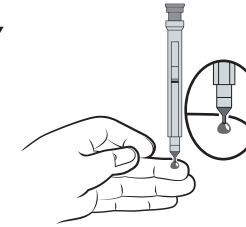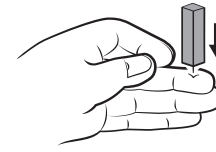

Interpretación de resultados:

NO REACTIVO



REACTIVO



INVÁLIDO



No hay línea de control o está fuera del área

INVÁLIDO



Línea de prueba fuera del área

**Se recomienda colocar el dispositivo de la muestra en la gradilla desechable de cartón y/o en el soporte de plástico individual (incluido en la caja) para un mejor control de la muestra.

